


飛沫感染リスクを軽減し、医療従事者を守る

上部内視鏡用飛沫防止シールド

実用新案出願済

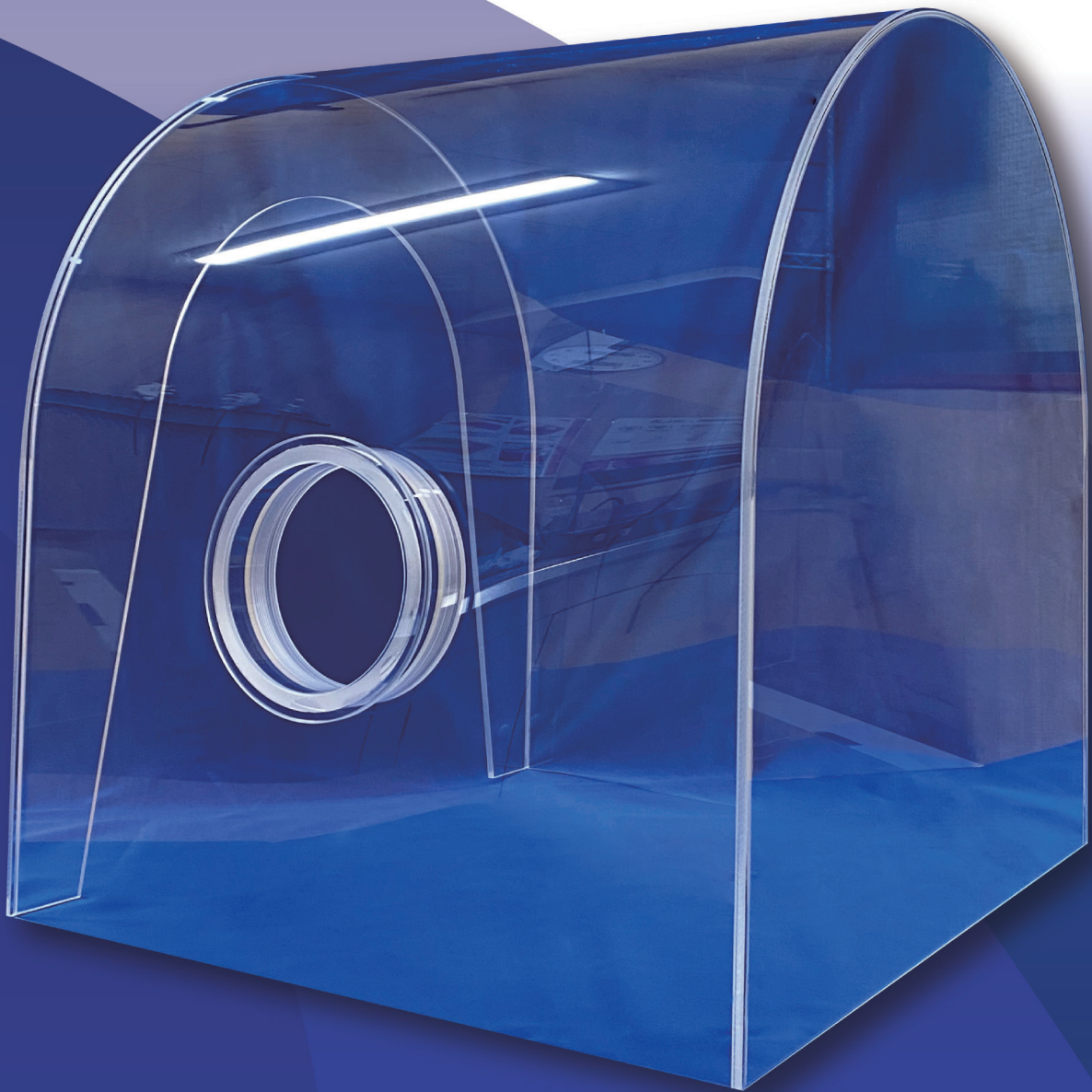

飛沫感染
リスク
軽減

アルコール
消毒に
強い


内視鏡医
による
監修

R形状で
視認性
UP


かぶせる
だけなので
簡単

上部内視鏡用飛沫防止シールド

内視鏡医による全面監修！医療従事者の飛沫感染リスクを軽減します。

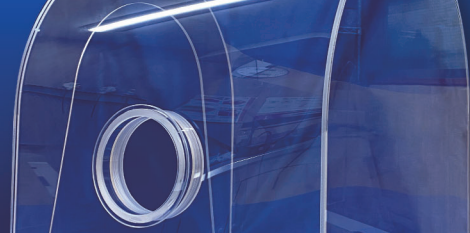


内視鏡挿入に最適な設計

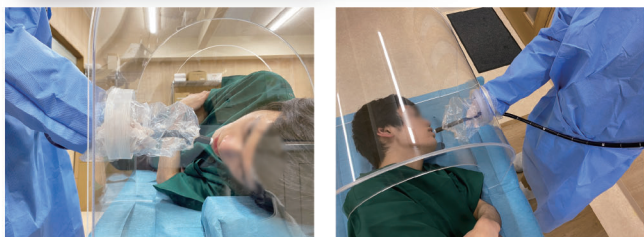

『上部内視鏡用飛沫防止シールド』は、熟練の内視鏡医（消化器病医師）の全面監修のもと設計されました。

側臥位の状態の患者の口元に内視鏡が曲がらずにすっと入ります。

介助がしやすい開口部設計

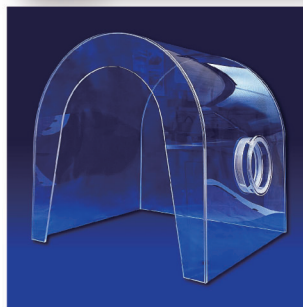

患者が頭を入れる開口部は、患者の背中側に腕を入れられる程度にゆとりを作っています。

術者とは別の介助者が、内視鏡挿入時にのけぞっ


てしまったり、不安を覚える患者の背中を抑えたり、さすったりしやすいサイズになっています。

アルコール消毒に強い素材



KOTOBUKI Medicalでは、耐薬品性の高い樹脂素材を『上部内視鏡用飛沫防止シールド』及び『エアロゾルボックスRタイプ』に採用しています。30分ごとのアルコール消毒を100回以上行い、割れや曇りが発生しないことを確認しております。

独自のR（ラウンド）形状

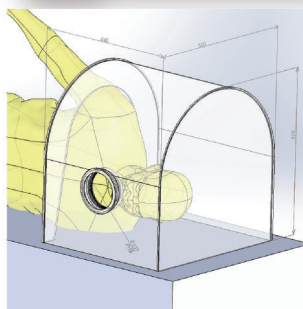

従来、市場では角型のエアロゾルボックスが一般的でしたが、本製品では、技術力を要するR（ラウンド）形状にすることで、術者がボックスに顔をぶつけることなく良好な視

界を得られるように改良致しました。アルコールで拭き上げる際の利便性もアップしました。

製品名：上部内視鏡用飛沫防止シールド

型番：ASB-R-UE

定価：52,000円（税抜）

JANコード：4562480971042

外寸法：幅445mm × 奥行500mm × 高さ500mm

製品重量：3,000g

ご購入は直営通販ショップからも可能です。
www.tech-kg-shop.com

腹腔鏡トレーニングボックスのお店 🔍

- ご使用方法** 医療用（ディスポタイプ）透明アームカバーを別途ご用意の上、毎回取り付けた上でご使用下さい。※製品に3枚付属しております。アームカバーは平置きで幅20cm以上（腕周り40cm以上）のサイズのものをご使用下さい。
- 消毒方法** ご使用毎に消毒用アルコールや0.05～0.1%の次亜塩素酸ナトリウム等で消毒してください。
- 使用上のご注意** 繰り返し消毒を行うと、表面に若干の曇りや細かい線が出る場合がございます点、ご了承ください。落下等で強い衝撃を与えると、割れたり接着が剥がれたりする可能性がございます。ご使用の際は取り扱いに十分ご注意ください。

※本製品は極力医療従事者の方々の飛沫感染リスクを軽減出来る様に設計しておりますが、100%の感染予防は保証出来かねる点、ご了承くださいませ。

